

Dokumenttyp:	Provtagningsinformation
Dokumentnamn:	Ledvätska Lv

ANALYS	RÖRTYP	REMISS OCH LABB	KOMMENTAR / OBS!
Ledvätskeodling + Direkt mikroskopi	Heparin, mörkblå propp, om möjligt minst 2 ml Mindre volymer kan analyseras ur original-spruta.	Elektroniskt via VAS: Mikrobiologi labb	Ange om provet kommer från naturlig eller artificiell led. Vid misstanke om bakteriell artrit och begränsat utbyte vid punktion bör odling prioriteras. OBS! Vid lång transporttid, ska ledvätska även sprutas i aerob (PED) och anaerob blododlingsflaska.
Lv-Glukos och Lv-Laktat	Na-fluorid-oxalat, grå propp, minst 1,0 mL	Elektroniskt via VAS: <u>Glukos</u> : Alla klin kem labb i länet <u>Laktat</u> : Klin kem labb i Gällivare och Sunderbyn	Ta S-Glukos samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp . <u>Laktat</u> skall vara laboratoriet tillhanda inom 15 minuter för centrifugering!
Lv-Leukocytpartikelkoncentration (LPK)	EDTA, lila propp, minst 1,0 mL	Elektroniskt via VAS: Alla klin kem labb i länet	Provet till klin kem lab så snart som möjligt, analys inom 2 tim.
Lv-Kristaller (mikroskopi)	Heparin, mörkblå propp, minst 1,0 mL	Elektroniskt via VAS: Klin kem labb i Sunderbyn	Kortisoninjektioner innehåller dubbel-brytande kristaller som ibland kan iaktas om patienten behandlats med detta.